



MortellaHeal


Den Verband richtig anlegen

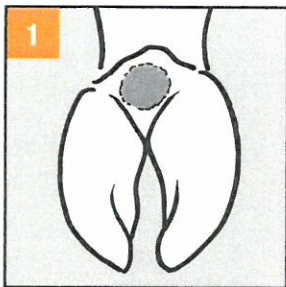


1
Erkrankte Stellen z.B. mit einem trockenen Einmalpapier reinigen.

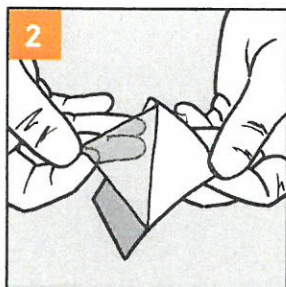


2
Weißes Abdeckpapier von Mortella Heal entfernen

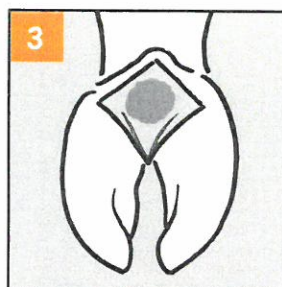


3
... und Wunde(n) mit der klebenden Seite von Mortella Heal vollständig abdecken, ggf. durch Auflegen mehrerer Pflaster.

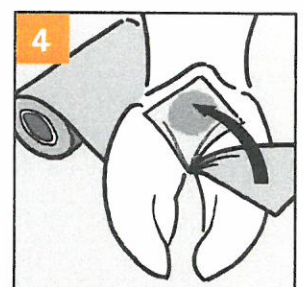


4
Selbsthaftende Binde von hinten nach vorne in den Zwischenklauenspalt einlegen.

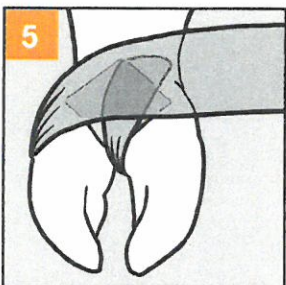


5
Mortella Heal sowie den Anfang der Binde mit der ersten Wicklung am Fuß fixieren.

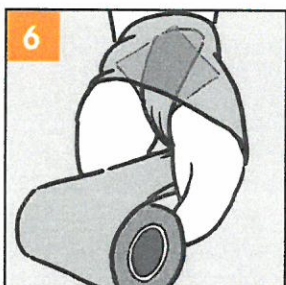


6
Binde erneut durch den Zwischenklauenspalt von vorne nach hinten führen.

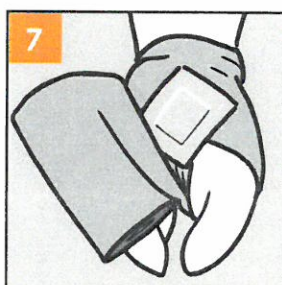


7
Druckpolster mittig auf die erste Wicklung des Verbandes auflegen ...

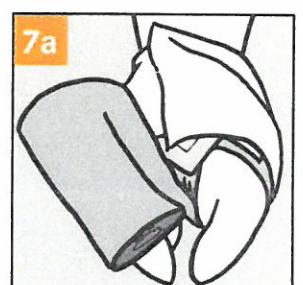


7a
... ggf. Verbandrand-Polster über den Verbandrand der ersten Wicklung legen ...

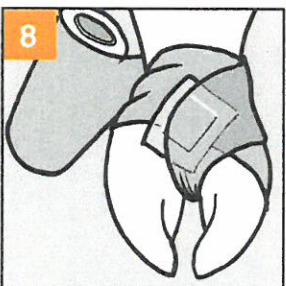


8
... und alles fixieren. Dann Binde durch den Zwischenklauenspalt führen ...

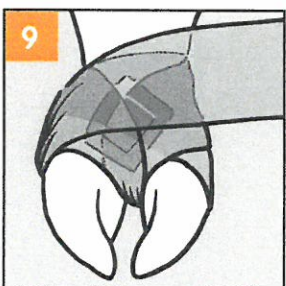


9
... und um den Ballen der Klaue herumlegen.

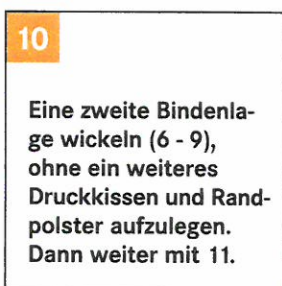

10
Eine zweite Bindenlage wickeln (6 - 9), ohne ein weiteres Druckkissen und Randpolster aufzulegen. Dann weiter mit 11.

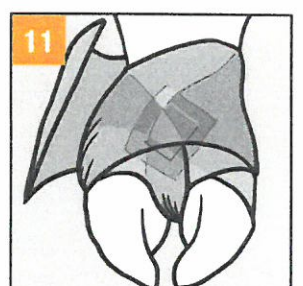


11
Binde einmal komplett um den Fuß herumführen; ggf. sichtbares Randpolster damit abdecken; Binde ggf. abreiben.

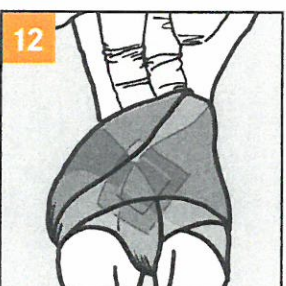

12
Bindende mit Mittel- und Zeigefinger von oben zwischen Haut und den Verbandrand schieben.

Damit der Verband nicht einschneidet, müssen beide Finger hinter den Verbandrand geschoben werden können!

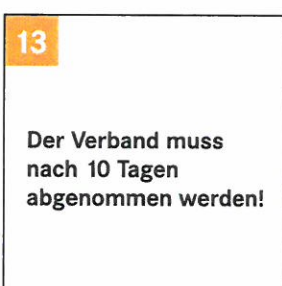

13
Der Verband muss nach 10 Tagen abgenommen werden!



Reichmuth AG, 8590 Romanshorn

Tel. 071 755 27 39

alles für meine Q, [www:meineQ.ch](http://www.meineQ.ch)



Bitte diese Kurzanleitung zuerst durchlesen

1. Behandlungsziel:

Mortellaro Druck in der Herde tief halten

Mortellaro kann sich auch beim Uebergang Euter - Bauch etablieren

2. Praxisanleitung zum Einsatz des Mortellaropflasters, Grundsätze:

Genau und sorgfältig arbeiten

Wundverband wie bisher, gewohnt, erfolgreich anbringen

Klauenverband mit Synthetikwatte (saugt nicht) gut polstern (inkl.Spalt)

Achtung: mit Elastverband nicht zu fest anziehen

Pflaster muss zu 100 % die Wunde abdecken, ev. zweites Pflaster

Immer Durckkissen oder Druckverband nach der ersten Verbandschicht

Meistens zuerst einen Elastverband und dann mit Tesaband festigen

Nach 3-4 Tagen sollte ein Besserung (Schmerzempfinden) eintreten

Verband nach 10 Tagen entfernen

Neue gebildete Haut nie mit z.B. Nova Derma behandeln (zu aggressiv)

Mortellaro-Symptome sind nach der erfolgreichen Pflasteranwendung verschwunden, die Krankheit bleibt im "Stall" vorhanden.

Präventivmassnahmen intensivieren:Hygiene, Trocken, Stallboden usw.

3. Vorgehen beim auflegen des Mortellaro - Pflasters

1. Befallener Fuss aufnehmen

2. Erdbeerkrankheit lokalisieren

3. bei fliessendem Wasser säubern

4. zu beandelnde Stelle trocknen (z.B. Einwegpapier), Pflaster hält besser

5. Wundabdeckung (100 %) mit Pflaster, ev. 2. Pflaster

6. Druckkissen für Wundkontakt auflegen.

7. Polsterung der zu verbindenden Stellen mit Synthetikwatte

8. Klaue einbinden mit Gaze, Elastverband, Verband (Fingertest)

9. Schutz des Verbandes mit Tesa-Bandrolle

10. Kuh laufen lassen und unter Kontrolle halten

11. Verband nach ca. 10 Tagen wegnehmen

11. Kleine, noch vorhandene befallene Stelle ev. mit Spray behandeln.

4. Präventivmassnahmen:

Keine Mortellaro-Kühe zukaufen

Hygiene im Stall verbessern, Kotschieber häufiger laufen lassen

Evt. einstreuen von trocknenden Pulvern (Liegeboxenkalk, Desical, u.a.)

Befallene Kühe möglichst schnell behandeln.

Ich wünsche Ihnen guten Behandlungserfolg!

M.Andermatt



Reichmuth AG, 8590 Romanshorn

Tel. 071 755 27 39

alles für meine Q, [www:meineQ.ch](http://www.meineQ.ch)

